

روش نمونه گیری خلط

- نمونه صبحگاهی بهتر است.
- بهتر است بیمار ناشتا باشد.
- نمونه اول در اولین مراجعه بیمار به هنگام تکمیل فرم مخصوص بیماریابی در حضور کارمند واحد بهداشتی و در فضای باز دریافت شود.
(از جمع آوری نمونه خلط در اتاق کوچک و یا در دستشویی خود داری شود)
- به بیمار بگویید نفس عمیق بکشد و چند ثانیه نفس خود را در سینه حبس کند و سپس با سرفه عمیق، خلط خود را در ظرف مربوطه تخلیه کند.
- در صورتی که بیمار نتواند با سرفه کردن نمونه خلط بدهد باید بیمار روی تخت معاینه طوری بخوابد که صورت او رو به پایین بوده و سر او پایین تر از سینه قرار گیرد.
- بهتر است حجم خلط بین ۳-۵ سی سی باشد.
- رنگ خلط ممکن است سفید، کدر یا سبز کدر باشد. خلط خونی، قرمز یا قهوه ای است.
- برای جمع آوری نمونه دوم، بهتر است به بیمار آموزش دهید که فردا موقع بیدار شدن از خواب، در محیط باز خارج از اتاق با سرفه های عمیق، نمونه تهیه کند و در نمونه را کاملاً محکم کند تا نشت نکند.
- سومین نمونه خلط تحت نظارت مستقیم کارمند واحد بهداشتی، در هنگام تحویل گرفتن نمونه دوم (حداقل ۲ ساعت بعد از نمونه دوم) تهیه شود.

کنترل کیفی میکروسکوپ

روزانه:

- تمیزی روغن از عدسی بعد از اتمام کار
- تمیزی روغن از عدسی بعد از مشاهده مثبت
- تمیز کردن کندانسور وسطی که لام روی آن قرار دارد.
- خاموش کردن لامپ میکروسکوپ
- قرار دادن پوشش میکروسکوپ بعد از اتمام کار

ماهانه:

- استفاده از برس های مخصوص جهت تمیز کردن گرد و غبار
- تمیز کردن عدسی های چشمی و شئی کندانسور با کاغذ عدسی خیس شده در گزیلن

هر ۶ ماه یکبار:

- سرویس دستگاه توسط پرسنل حرفه ای

کنترل کیفی یخچال

- الصاق چارت کنترل دما
- نظافت و ضد عفونی داخل یخچال ماهانه یکبار با فنل ۵٪
- نظافت و برفک زدایی هر سه ماه یکبار به شرط وجود برفک

کنترل کیفی هود

- محل قرار گرفتن هود
- اطمینان از تعادل جریان هوای خروجی و ورودی
- خروج مناسب کانال هود (پیچ اضافی نداشته باشد، هم قطر باشد)
- بررسی وجود هرگونه منفذ در فیلترهای بکارگرفته شده توسط شرکت مربوطه
- ثبت تاریخ تعویض فیلتر و UV هود
- نظافت داخل هود و استفاده از فرمالدهید و پتاسیم پرمنگنات هر ماه یکبار
- گردگیری و تمیز کردن لامپهای UV با اتانل ۷۰٪
- روشن بودن UV هود، ۵/۰ ساعت قبل و ۲ ساعت بعد از انجام کار
- ثبت مدت زمان کارکرد هود
- کف هود بهتراست با فنل ۵٪ و سپس اتانل ۷۰٪ تمیز گردد.

کنترل کیفی اتوکلاو

- برای هر بار استفاده باید از چسب اتوکلاو و اندیکاتور شیمیایی استفاده کرد.
- نوار TST، که بر سه عامل زمان، بخار و دما نظارت می کند.

به طور هفتگی:

- از اندیکاتور بیولوژیک شامل نوار اسپوردار یا ویال باسیلوس استئاروترموفیلوس استفاده و صحت دماسنج را کنترل نمود.
- چسب اتوکلاو به هیچ وجه جهت کنترل کیفی کاربرد ندارد و فقط نشانه ای است از این که آیا بسته مورد نظر داخل دستگاه قرار گرفته یا خیر.